



OMRON

Руководство по эксплуатации **ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (АДАПТЕР) OMRON AC ADAPTER-S (60240HW5SW)**

Предназначен для питания от электрической сети напряжением 220В автоматических тонометров OMRON*



Благодарим Вас за покупку!

* Смотрите Руководство по эксплуатации к Вашему прибору

All for Healthcare

Адаптер соответствует всем требованиям безопасности, предусмотренным законодательством РФ.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ
ГОСТ Р РОССТАНДАРТ РОССИИ:

Сертификат соответствия:

№ РОСС JP.ME20.V07357

от 09.11.2012 г. Срок действия до 09.11.2015 г.

ВНИИНМАШ. Орган по сертификации средств информатизации, приборо-строения, медицинской техники и электрооборудования (ОС «Сертинформ ВНИИНМАШ»)

Соответствуют требованиям:

ГОСТ Р МЭК 60065-2005, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2-2005) (разд. 6,7),
ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3-2005),
ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005) (разд.4)

Срок службы – 7 лет.

Правила пользования

1. Соедините штекер блока питания с гнездом внешнего питания измерителя артериального давления.
2. Подсоедините силовую вилку адаптера к розетке внешней электрической сети.

Меры предосторожности

1. Не допускайте сгибов, переломов шнура адаптера.
2. Не допускайте проникновения влаги в корпус адаптера.
3. Не производите самостоятельную разборку или ремонт адаптера.
4. Не оставляйте адаптер включенным в сеть на длительное время.

В случае обнаружения дефекта, обращайтесь в гарантийную мастерскую.

Технические характеристики

Модель . . . OMRON AC ADAPTER-S (60240HW5SW)
Электрическая сеть . . . 100-240 В, 50/60Гц/0,12А
Выходное напряжение 6V DC/500mA

Комплект поставки

Блок питания — 1 шт.

Упаковочная коробка — 1 шт.

Руководство по эксплуатации — 1 шт.

ВНИМАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

Адаптер сетевой модель OMRON AC ADAPTER-S предназначен только для электропитания автоматических осциллометрических измерителей артериального давления OMRON и не может использоваться для электропитания других электрических приборов.

Если у Вас возникли вопросы по эксплуатации прибора, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки клиентов OMRON по телефону бесплатной горячей линии по России: **8-800-555-00-80** или посетите наш интернет сайт по адресу: **www.csmedica.ru**

В случае неисправности прибора Вы можете получить информацию о ближайшем авторизованном сервисном центре, осуществляющем гарантийный ремонт и послегарантийное обслуживание приборов OMRON, по телефону горячей линии.

Надлежащая утилизация прибора (использованное электрическое и электронное оборудование)



Этот символ на приборе или описании к нему указывает, что данный прибор не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы. Чтобы предотвратить возможный ущерб для окружающей среды вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите это изделие от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

Для утилизации прибора обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в Вашем городе, или к местным органам власти для получения подробной информации о том, куда и как вернуть данный прибор для экологически безопасной переработки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

OMRON Healthcare Co., Ltd. (Japan)

(ОМРОН Хелскэа Ко., Лтд.(Япония))

53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto,
617-0002, JAPAN

(53, Кунотсубо, Терадо-чо, Муко, Киото,
617-0002, ЯПОНИЯ)

на производственном подразделении MITSUMI
PHILIPPINES, INC. (МИТСУМИ ФИЛИППИНС, ИНК.)

Luzon Avenue, Phase 1 The Freeport Area of Bataan
Mariveles, Bataan, Philippines 2106

(Лузон Авеню, Фейз 1 Фрипорт Эреа оф Батаан
Маривелес, Батаан, Филиппины 2106)

Сделано в Филиппинах

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ЕВРОПЕ:

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.

(ОМРОН ХЭЛСКЭА ЕВРОПА Б.В.)

Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, THE NETHERLANDS

(Скорпиус 33, 2132 ЛР Хуфддорп, НИДЕРЛАНДЫ)

www.omron-healthcare.com



ЗАО «КомплектСервис» –
эксклюзивный дистрибьютор
и импортер медицинской техники
OMRON в России

Юридический адрес:

123557, Москва, Большой Тишинский переулок,
д. 26, корп.13-14

По вопросам реализации и закупок

обращайтесь по адресу:

125413, Москва, ул. Солнечногорская, д. 4

Тел/факс: (495) 987-18-92, 987-18-93

По вопросам сервиса

обращайтесь по адресу: 127006, Москва,

Воротниковский пер., д. 7, стр. 3

Тел/факс: (499) 995-11-32 (многоканальный)

Бесплатная горячая линия по России:

8-800-555-00-80

E-mail: csinfo@csmedica.ru,

service@csmedica.ru (сервисный центр)

www.csmedica.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Дата продажи _____

Штамп магазина

Подпись продавца _____

Изделие во всех режимах работы
проверялось в присутствии покупателя

Подпись покупателя _____

СРОК ГАРАНТИИ 24 МЕСЯЦА

D18.M08.G2014