

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАНЖЕТЫ ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, тип H, D, P, S, V



МОДИФИКАЦИИ:

- Манжета № 1 "CS Medica" index "H" - для новорожденных с длиной окружности плеча 9-14 см
- Манжета № 2 "CS Medica" index "D" - для детей с длиной окружности плеча 13-22 см
- Манжета № 3 "CS Medica" index "P" - для подростков с длиной окружности плеча 18-27 см
- Манжета № 4 "CS Medica" index "S" - взрослый размер, для людей с длиной окружности плеча 24-42 см
- Манжета № 5 "CS Medica" index "B" - большой взрослый размер, для людей с длиной окружности плеча 34-50 см

Наличие манжет для рук с различной длиной окружности плеча даёт возможность измерять артериальное давление приборами моделей "CS Medica" у всех возрастных категорий пользователей.

ВНИМАНИЕ: Размер манжеты должен обязательно соответствовать длине окружности плеча каждого конкретного пользователя. Несоответствие размера манжеты с длиной окружности плеча отрицательно сказывается на точности измерения артериального давления.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ МАНЖЕТОЙ

- 1) Вставьте в одну из двух отходящих воздушных трубок манометр. Во вторую трубку - нагнетательную грушу.
 - 2) Наложите манжету на левое или правое плечо таким образом, чтобы место соединения манжеты с воздушной трубкой находилось на внутренней стороне руки (вдоль артерии).
 - 3) Оберните манжету вокруг плеча так, чтобы место соединения манжеты с воздушной трубкой находилось на 1-2 см выше локтевого сгиба.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** Следите за тем, чтобы между манжетой и рукой не было пространства. Для ликвидации этого пространства наложите манжету немного на конус.
- 4) Манжета должна повторять форму Вашей руки.
 - 5) Положите руку на стол ладонью вверх так, чтобы манжета была на уровне сердца. При необходимости подложите под руку подушечку или свернутое полотенце. Расслабьтесь и слегка сожмите ладонь.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Пятна на манжете удаляйте аккуратно, используя ткань, смоченную в водно-мыльном растворе. Стирать манжету запрещается.
- Для защиты манжеты от пыли и сырости храните её в специальном чехле.
- Не допускать сгибов, переломов и растяжений резинового шланга и манжеты.
- Не производите самостоятельно ремонт манжеты. В случае обнаружения дефекта обращайтесь в гарантийную мастерскую.

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение всего срока службы. При правильной эксплуатации срок службы манжеты составит не менее 1 года или 2 тыс. измерений, в зависимости от того, какая из единиц измерения будет достигнута (наступит) раньше.

Срок гарантии: 1 год

Модель _____ Дата продажи _____

Штамп магазина _____ Подпись продавца _____

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, внешний вид проверил, товар в полной комплектации получил

Подпись покупателя _____

Дата обращения _____ Заключение мастера, выполненные работы _____

Дата выдачи (возврата) прибора потребителю

Подпись
или штамп мастера

Работу принял _____
(подпись клиента)

- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04558 от 07.10.2010 г., срок действия не ограничен.

- СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р РОССТАНДАРТ РОССИИ

Декларация о соответствии № РОСС СМ.АГ75.Д42231 от 10.10.2013 г., срок действия до 09.10.2018 г. Соответствует требованиям нормативных документов: ГОСТ Р 50444-92 (р.3,4), ГОСТ Р 51959.1-2002



СИЭС МЕДИКА

Произведено по заказу и под контролем **ООО «СиЭс Медика»**
Официальным представителем торговой марки «CS Medica» в России является ООО «СиЭс Медика»

Юридический адрес: 127006, Москва, Воротниковский пер., д. 7, стр. 3

Почтовый адрес: 125413, Москва, ул. Солнечногогорская, 4

Адрес и телефоны Центра технического обслуживания «СиЭс Медика»:

127006, Москва, Воротниковский пер., д. 7, стр. 3 (м. «Маяковская»)

Тел/факс: 8 (499) 995-11-32 (многоканальный)

E-mail: csinfo@csmedica.ru, service@csmedica.ru (сервисный центр)

www.csmedica.ru

Часы работы Центра технического обслуживания: пн-пт: с 09.30 до 19.00 (без перерыва на обед),
сб: с 10.00 до 18.00 (без перерыва на обед), вс и праздничные дни - выходной.

Бесплатная горячая линия по России: 8-800-555-00-80

Производитель: Shenzhen Complectservice Industrial & Trade Co., Ltd. Wuxi Branch, № 3 workshop, 38 Jingrui Road, Xibei Industrial Park, Xibei Town, Xishan District, 214194 Wuxi City, JiangSu Province, People's Republic of China
(Шеньчжень Комплектсервис Индустриал энд Трейд Ко., Лтд. Уси Брэнч, заводской корпус № 3, улица Цзинъюэ 38, промышленная зона Сибэй, посёлок Сибэй, район Сишань, 214194, г. Уси, провинция Цзянсу, Китай)

АДРЕСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ЦЕНТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ OMRON В РОССИИ

- Арзамас, ООО «СисЭс Медика Поволжье», ул. Жукковского, д. 13/2, оф. 22, тел.: 8 (831) 472-96-05, arz_cs@bk.ru
- Армавир, ООО «СисЭс Медика Кубань» (Краснодар), ул. Ефремова, д. 101, тел.: (86137) 58-202, cs.medicam@mail.ru
- Архангельск, ООО «СисЭс Медика Поморье», ул. Северодвинская, д. 63, тел.: (8182) 64-09-55, 20-22-10, pomorie@csmedica.ru
- Астрахань, ООО «СисЭс Медика Астрахань», ул. Боевая, д. 134, тел.: (8512) 38-20-78, astrahan@csmedica.ru
- Барнаул, ООО «СисЭс Медика Алтай», ул. Юрина, д. 188б, тел.: (3852) 54-37-54, 60-30-22 cs-bar@mail.ru
- Белгород, ООО «СисЭс Медика Белгород», ул. Ариерейская, д. 2А, оф. 11 тел.: (4722) 42-12-94, belgorod@csmedica.ru
- Благовещенск, ООО «СисЭс Медика Восточный Регион» (Иркутск), ул. Чайковского, д. 7, оф. 321, тел.: (4162) 42-12-23, csmedica.amur@tst.ru
- Братск, ООО «СисЭс Медика Восток» (Иркутск), ул. Гагарина, д. 16, оф. 4, тел.: (3953) 41-33-81, доб. 231, csmedica@bk.ru
- Брянск, ООО «СисЭс Медика Брянск», 2 Советский переулок, д.3, оф. №1, тел.: (4832) 37-15-93, 37-15-94, cs-bryansk@bk.ru
- Великий Новгород, ООО «СисЭс Медика Северо-Запад», ул. Мерещкова-Волосова, д. 9, тел.: (951) 722-15-75, novgorod@csmedica.ru
- Владивосток, ООО «СисЭс Медика Восточный Регион» (Иркутск), ул. Лазо, д. 9, оф. 101, тел.: (4232) 37-00-57, 60-60-28, csmedica-dv@mail.ru
- Владимир, ООО «СисЭс Медика Владимир», ул. Сурикова, д. 10А, оф. 6, тел.: (4922) 52-54-47, csmedica-vladimir@mail.ru
- Волгоград, ООО «СисЭс Медика Нижняя Волга», ул. Землянского, д. 7, тел.: (8442) 23-84-44, 23-31-14, 24-34-49, csmedica34@mail.ru
- Вологда, ООО «СисЭс Медика Вологда», Советский просп., д. 50, оф. 5, тел.: (8172) 75-45-76, csmedica@vologda.ru
- Воронеж, ООО «СисЭс Медика Черноземье», ул. Грамши, д. 73а, тел.: (4732) 39-31-47, 39-18-54, voronezh@csmedica.wm.ru
- Екатеринбург, Офис ООО «СисЭс Медика Урал», ул. Тургенева, д. 30А, тел.: (343) 222-74-75, med@csmedica-ural.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. 8 Марта, д. 5, оф. 117, тел.: (343) 371-30-84, 371-34-11, service@csmedica-ural.ru
- Иваново, ООО «СисЭс Медика Иваново», ул. Колесникова, д. 11/2, тел.: (4932) 29-03-74, csmedica-ivanovo@mail.ru
- Ижевск, ООО «СисЭс Медика Вятка» (Киров), ул. Союзная, д. 49а, оф. 4, тел.: (3412) 36-76-60, csmedica18@mail.ru
- Иркутск, ООО «СисЭс Медика Восток», ул. Карла Либкнехта, д. 121, тел.: (3952) 205-141, 206-687, 298-458, 298-456, 291-268, vostok@csmedicairk.ru
- Йошкар-Ола, ООО «СисЭс Медика Йошкар-Ола», просп. Гагарина, д. 14А, тел.: (8362) 42-65-81, 42-26-73, csm@mar-el.ru
- Казань, ООО «СисЭс Медика Казань», ул. Чистопольская, д. 81, оф. 13, тел.: (843) 527-51-06, 527-64-43, csmedica16-wm@phn.ru
- Калининград, ООО «СисЭс Медика Калининград», ул. Наревская, д. 49е, оф. 208, 206, тел.: (4012) 95-38-65, kaliningrad@csmedica.ru
- Калуга, ООО «СисЭс Медика Калуга», ул. Окружная, д. 7, тел.: (4842) 909-989, 995-069, 909-989, 8 (903) 636-50-69, csmedica.kaluga@mail.ru
- Кемерово, ООО «СисЭс Медика Кемерово», ул. Свободы, д. 35, оф. 103, тел.: (3842) 59-22-02, 65-74-60 nikitin_cs@mail.ru
- Киров, ООО «СисЭс Медика Вятка», Студенческий пр., д. 19, к. 2, тел.: (8332) 51-36-25, 51-36-26, vuyka@csmedica.ru
- Кострома, ООО «СисЭс Медика Иваново», просп. Мира, д. 51, тел.: (4942) 55-28-73, csmedica-ivanovo@mail.ru
- Краснодар, ООО «СисЭс Медика Кубань», ул. Дзержинского, д. 40, тел.: (8611) 210-01-92, 210-01-35, cs.medica@kubanet.net
- Красноярск, ООО «СисЭс Медика Енисей», ул. Красной Гвардии, д. 21, оф. 601, 602, тел.: (3911) 221-24-83, 221-20-72, 221-60-98, info@csmedicaenisey.ru
- Курск, ООО «СисЭс Медика Курск», ул. Гайдара, д. 18, 1 этаж, тел.: (4712) 74-00-78, 74-00-79, cs-kursk@rambler.ru
- Липецк, ООО «СисЭс Медика Липецк», ул. Угловая, д. 15, владение 7, тел.: (4742) 27-03-78, 28-14-70, lipetsk@csmedica.ru
- Магнитогорск, ООО «СисЭс Медика Урал» (Екатеринбург), пр. К. Маркса, д. 143/3, тел.: (3519) 29-49-14, mgn@csmedica-ural.ru
- Махачкала, ООО «СисЭс Медика Махачкала», ул. Дзержинского, д. 176, к. 24, тел.: (8722) 55-85-40, csmaachkala@mail.ru
- Минеральные воды, ООО «СисЭс Медика Северный Кавказ», ул. Новоселов, д. 10б, тел.: (87922) 6-02-31, факс 6-06-48, csmedicaqm@mail.ru
- Мурманск, ООО «СисЭс Медика Карелия» (Петрозаводск), просп. Ленина, д. 5, оф. 1, тел.: (8152) 25-53-43, murtansk@csmedica.ru
- Набережные Челны, ООО «СисЭс Медика Казань», просп. Московский, д. 91, тел.: (8552) 58-94-97, csmedica16-4@mail.ru
- Нижневартовск, ООО «СисЭс Медика Югра», просп. Победы, д. 26б, оф. OMRON, тел.: 8 (902) 855-85-01, 8 (9088) 73-30-47 cstyumen@mail.ru, cs-nv86@yandex.ru
- Нижний Новгород, ООО «СисЭс Медика Поволжье», ул. Горького, д. 48/50, тел.: (831) 434-44-77, 433-90-90, csmedica@csmedica.nnov.ru
- Новокузнецк, ООО «СисЭс Медика Новокузнецк», ул. Суворова, д. 6, тел.: (3843) 74-22-30, novokuznetsk@csmedica.ru
- Новороссиисск, ООО «СисЭс Медика Кубань» (Краснодар), ул. Энгельса, д. 78, тел.: (8617) 72-35-40, cs.medicatov@mail.ru
- Новосибирск, ООО «СисЭс Медика Сибирь», ул. Немировича-Данченко, д. 169, тел.: (383) 346-18-11, 346-20-68, cs-siberia@mail.ru
- Омск, ООО «СисЭс Медика Омск», ул. Косарева, д. 103, тел.: (3812) 21-03-00, 25-54-66, 59-55-03, csmedica.omsk@mail.ru
- Орел, ООО «СисЭс Медика Орел», ул. 8 Марта, д. 8, тел.: (4862) 43-67-99, ore@csmedica.ru
- Оренбург, ООО «СисЭс Медика Оренбург», ул. Цивиллинга, д. 46, оф. 4, тел.: (3532) 404-607, 404-608, csorenburg@mail.ru
- Орехово-Зуево, ООО «СисЭс Медика Подмосковье», Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, д. 80а, тел.: (496) 412-64-27, csrodmoskovie@mail.ru
- Пенза, ООО «СисЭс Медика Пенза», ул. Калинина, д. 89, тел.: (8412) 56-18-37, 32-05-05, penza@csmedica.ru
- Пермь, ООО «СисЭс Медика Пермь», ул. Мильчакова, д. 28, тел.: (342) 224-52-19, 229-87-75, perm@csmedica.ru
- Петрозаводск, ООО «СисЭс Медика Карелия», ул. Мерещкого, д. 16, тел.: (8142) 59-27-14, karelia@csmedica.ru
- Псков, ООО «СисЭс Медика Северо-Запад», ул. Леона Поземского, д. 10, помещение 1001, тел.: 8(911)885-07-56, csmedica.pskov@yandex.ru
- Росошь, ООО «СисЭс Медика Черноземье» (Воронеж), ул. 9 Января, д. 12, тел.: (47396) 4-88-94, rossosh@csmedica.ru
- Ростов-на-Дону, ООО «СисЭс Медика Ростов-на-Дону», ул. Фурмановская, д. 148, тел.: (863) 231-03-85 (86), 231-04-85 (86), 231-07-87, rostov@csmedica.ru
- Рязань, ООО «СисЭс Медика Рязань», ул. Семена Середы, д. 42, тел.: (4912) 96-63-10, 96-93-66, ryzan@csmedica.ru
- Самара, Офис ООО «СисЭс Медика Самара», ул. Революционная, д. 70, стр. 3, оф. 300, тел.: (846) 267-38-33, 273-83-63, 273-83-22, csmedica-samara@samara.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. Революционная, д. 70, строение 3, оф. 103, тел.: (846) 267-38-40 service63@csmedica.ru
- Санкт-Петербург, Офис ООО «СисЭс Медика Северо-Запад», проспект Обуховской обороны, д. 120 лит. И, оф. 713, тел.: (812) 309-09-80, (812)-316-55-00 csnw@csmedica.ru
- Сервисно-консультационный центр, Малодетскосельский просп., д. 36, тел.: (812) 715-88-93, spbsevice@csmedica.ru
- Саранск, ООО «СисЭс Медика Саранск», ул. Васенко, д. 15, подъезд №3, 2 этаж, комната №22, тел.: (8342) 27-03-24, 22-23-91, csmedica@saransk.ru
- Саратов, ООО «СисЭс Медика Саратов», ул. Чапаева, 112/124, тел.: (8452) 79-90-45, 79-90-46, csmaratov@mail.ru
- Саров, ООО «СисЭс Медика Поволжье» (Н. Новгород), просп. Октябрьский, д. 18, тел.: (83130) 6-39-59, csmedica.sar@mail.ru
- Смоленск, ООО «СисЭс Медика Смоленск», просп. Гагарина, д. 60, тел.: (4812) 35-85-68, smolensk@csmedica.ru
- Сочи, ООО «СисЭс Медика Кубань» (Краснодар), Центральный район, ул. Конституции СССР, д. 28, тел.: (8622) 64-74-67, cs.medicasochi@mail.ru
- Ставрополь, ООО «СисЭс Медика Ставрополь», ул. Маршала Жукова, д. 7, тел.: (8652) 26-38-96, 26-38-93, csmedicacast@mail.ru
- Старый Оскол, ООО «СисЭс Медика Белгород», ул. Ватутина, д. 54, тел.: (4725) 24-17-89, oskol_cs@mail.ru
- Сургут, ООО «СисЭс Медика Югра», ул. Университетская, д. 25, оф. OMRON, тел.: 8 (912) 817-41-41, 8 (9088) 73-30-47 cstyumen@mail.ru, ccssurgut@mail.ru
- Сызрань, ООО «СисЭс Медика Самара», ул. Московская, д. 4, тел.: (8464) 92-25-49, sismedica@mail.ru
- Тамбов, ООО «СисЭс Медика Тамбов», ул. Чичканова, д. 48, №16, тел.: 8 (4752) 53-51-94, tambov@csmedica.ru
- Тверь, ООО «СисЭс Медика Тверь», просп. Чайковского, д. 23, тел.: (4822) 32-89-66, tvr@csmedica.ru
- Тольятти, ООО «СисЭс Медика Самара», ул. Общественная, дом ба, оф. 4, тел.: (8482) 74-88-89, 36-11-36, csmedica-til@yandex.ru
- Томск, ООО «СисЭс Медика Томск», ул. Нахимова, 13/1, оф. 205, тел.: (3822) 902-703, info_tomsk@mail.ru
- Тула, ООО «СисЭс Медика Тула», ул. Демонстрационная, д. 149, тел.: (4872) 36-80-56, tula@csmedica.ru
- Тюмень, ООО «СисЭс Медика Тюмень», ул. Амурская, д. 2, оф. 2., тел.: 8-908-873-30-47, (3452) 30-46-17, cstyumen@mail.ru
- Улан-Удэ, ООО «СисЭс Медика Восток» (Иркутск), ул. Свердловка, д. 12*, оф. 101, тел.: (3012) 21-82-29, csmedicabur@mail.ru
- Ульяновск, ООО «СисЭс Медика Поволжье» (Н. Новгород), Западный б-р, д. 27, оф. 101, тел.: (8422) 68-77-95, 688-128, csmedica.uln@yandex.ru
- Уфа, ООО «СисЭс Медика Башкортостан», ул. Натальи Ковшовой, д. 10, тел.: (3472) 34-18-08, csmedica.ufa@mail.ru
- Хабаровск, ООО «СисЭс Медика Восточный Регион» (Иркутск), ул. Ким-Ю-Чена, д. 44/1, оф. 3, тел.: (4212) 41-12-65, csmedica.hab@mail.ru
- Чебоксары, ООО «СисЭс Медика Чебоксары», ул. Энгельса, д. 28, оф. 107, тел.: (8352) 56-24-08, 57-43-31, csm-ch@mail.ru
- Челябинск, ООО «СисЭс Медика Урал» (Екатеринбург), ул. Свободы, д. 145, тел.: (351) 237-48-93, chel@csmedica-ural.ru
- Череповец, ООО «СисЭс Медика Вологда», ул. Краснодонец, д. 24, оф. 1, тел.: (8202) 20-55-33, csmedicacheropovets@rambler.ru
- Чита, ООО «СисЭс Медика Восточный Регион» (Иркутск), ул. Чайковского, д. 30, оф. 10, тел.: (3022) 32-49-03, csmedica-chita@mail.ru
- Шахты, ООО «СисЭс Медика Ростов-на-Дону», ул. Июнова, д. 110 а, тел.: (86362) 6-80-52, 6-80-53, shuhti@csmedica.ru
- Ярославль, ООО «СисЭс Медика Ярославль», ул. Салтыкова-Щедрина, д. 44/18 тел.: (4852) 90-66-53, 20-12-50, 73-11-82 yaroslavl@csmedica.ru