



Инструкции по уходу


Промойте спейсер OptiChamber Advantage перед первым использованием и не реже одного раза в неделю.

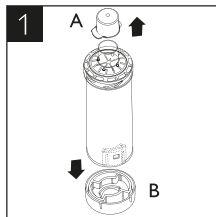


Снимите защитные колпачки и торцевую крышку.

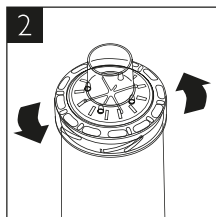


Поверните мундштук устройства против часовой стрелки и поднимите его вверх для удаления.

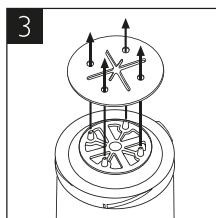


Снимите клапан вдоха со штырьков на торце спейсера.

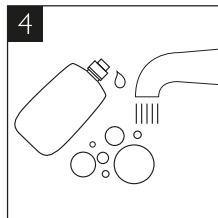


Промойте все части устройства теплой водой с мягким жидким мылом в течение 15 минут.

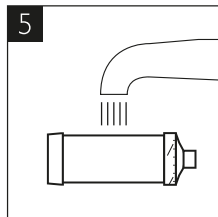

Тщательно прополощите все части устройства в проточной воде и хорошо встряхните. Просушивание при комнатной температуре с последующей сборкой.

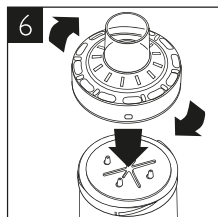

Для сборки устройства держите камеру вертикально и установите клапан на штырьки. Установите на место мундштук и поверните его по часовой стрелке до упора.

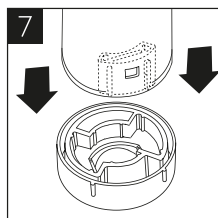

Совместите встроенный свисток с вертикальными линиями на эластичном адаптере. Положите адаптер на твердую поверхность, установите на него устройство и нажмите до полного соединения.

PHILIPS
RESPIRONICS

OptiChamber Advantage

Ручное распределяющее устройство (спейсер) для использования вместе с дозирующими аэрозольными ингаляторами

Инструкции по эксплуатации



Respironics and OptiChamber Advantage are trademarks of Respironics, Inc. and its affiliates. All rights reserved.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.



Respironics New Jersey, Inc.
5 Wood Hollow Road
Parsippany, NJ 07054

Made and printed in USA



Respironics Deutschland GmbH
Gewerbestrasse 17
82211 Herrsching, Germany

Импортер в РФ:
ООО «ГТ синергия консалтинг» Групп
117418, г. Москва, а/я 86
Тел/факс: +7(495)7187591
+7(985)7617249



Рег.Уд. №ФС3 2011/09167


www.philips.com/respironics




OptiChamber Advantage Ручное
распределяющее устройство (спейсер) для
использования вместе с дозирующими
аэрозольными ингаляторами

Инструкции по эксплуатации


для индивидуального использования.

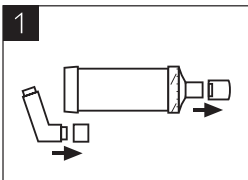


Снимите защитный
колпачок.

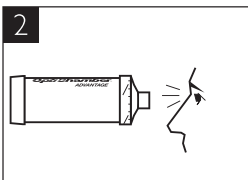


Загляните вовнутрь и
удалите все посторонние
предметы из спейсера.

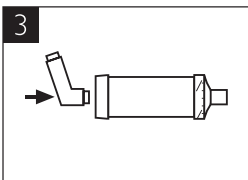


Вставьте до упора
баллончик ДАИ со
стороны эластичного
адаптора.

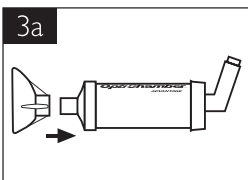


При необходимости
использования маски,
наденьте ее на мундштук
так, чтобы она полностью
закрывала мундштук.

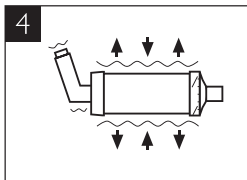

Встряхните спейсер с
установленным
баллончиком ДАИ
4–5 раз или выполните
инструкции по
использованию
лекарственного препарата.

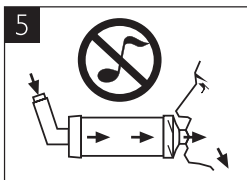

Для ингаляции: плотно
обхватите мундштук
губами, нажмите на дно
баллончика ДАИ, сделайте
вдох. Если слышен свист,
дышите медленнее.
Задержите дыхание на
8–10 секунд.

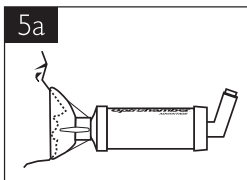

При использовании
маски: прижмите маску
к лицу и сделайте, по
крайней мере, 6 вдохов
сразу после нажатия на дно
баллончика дозирующего
ингалятора и распыления
лекарства.



Если врач назначил
дополнительную дозу
лекарственного препарата,
повторите стадии 3–5
через 1 минуту. Уберите
спейсер в коробку до
следующего использования.

Предупреждение

Не разрешайте детям играть с устройством OptiChamber Advantage. Если Вы точно не знаете как использовать спейсер, контактируйте с вашим лечащим врачом. Замените устройство, если части или сам спейсер испорчены. Клапан вдоха к OptiChamber Advantage можно заказать отдельно.

Примечания

ВАЖНО! Следуйте инструкции дозирующего аэрозольного ингалятора (ДАИ). OptiChamber Advantage и маски не содержат латекс.

Применение

OptiChamber Advantage может использоваться вместе с дозирочными аэрозольными ингаляторами (ДАИ) для оптимизации доставки лекарства в дыхательные пути. OptiChamber Advantage может использоваться всеми пациентами, применяющими ДАИ, как детьми так и взрослыми. Устройство предназначено для использования дома, в клиниках и больницах. OptiChamber Advantage должен быть заменен после 1 года использования.